



Кресло-кровать
для родовспоможения

LM-02

FREYA 3




Кресло-кровать
для родовспоможения

LM-02

FREYA 3

Современное 4-х секционное родо-
вое кресло-кровать с фиксированной
секцией сиденья, установленное
на 3 колоннах, с электрическим
управлением.

Кровать оснащена функциями: изменения высоты ложа, изменения угла наклона спинной и бедренной секций, регулировки продольных наклонов (Тренделенбург и Антитренделенбург) и функцией быстрой разблокировки спинной секции (CPR). Кровать имеет три системы управления: центральная панель управления (supervisor), проводной пульт управления и панели управления в боковых ограждениях. Для повышения безопасности пациентки панели управления, размещенные с внутренней стороны боковых ограждений, оснащены функцией ночной подсветки пола и вызова медицинского персонала. По этой же причине функции проводного пульта управления требуют подтверждения при помощи специального ключа. Панели управления на внешних сторонах боковых ограждений позволяют быстро установить кровать в положения Тренделенбург и Антитренделенбург. Центральная панель управления позволяет установить положение Фовлера, нулевую позицию, положение для осмотра и положение кардиологического кресла.

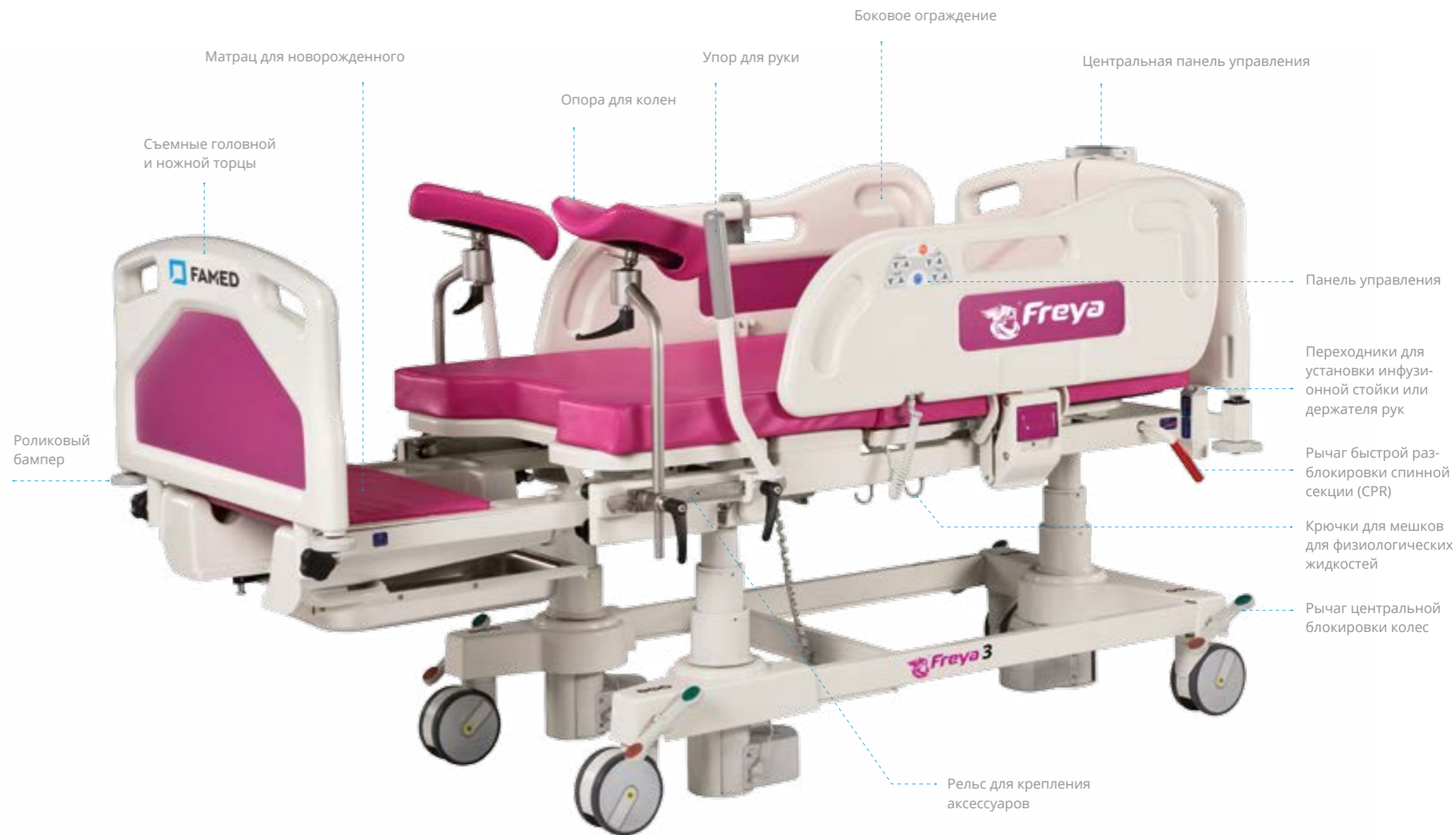

Стандартное оснащение:



Матрац для новорожденного



Выдвигаемый съемный лоток для физиологических жидкостей



Центральная панель управления (supervisor)



Рычаг быстрой разблокировки спинной секции (CPR)



Опоры для ног



Опоры для колен



Преимущества кровати LM-02 (Freya 3):

- Широкий диапазон регулировок создает множество положений пациентки
- Три системы управления (одна из которых для пациентки)
- Низкая высота ложа, облегчающая вставание
- Высокий уровень технического исполнения



Ректоскопия



Горизонтальное положение



Горизонтальное положение с матрасом для новорожденного



Полусидячее положение

Положения пациентки на кресле-кровати LM-02 (Freya 3):

- Кровать с легкостью трансформируется в комфортное многофункциональное кресло, гарантирующее роженице любой комплекции удобство расположение в оптимальной для нее позиции на всех этапах родового процесса:
- Положение «кардиологическое кресло»
- Положение для гинекологического осмотра
- Положение Фовлера
- Нулевое положение



Гинекологический осмотр



Сидячее положение (с опущенными боковыми ограждениями)



Сидячее положение (с поднятыми боковыми ограждениями)



Устройства управления электрическими функциями:

- Центральная панель управления (supervisor)
- Проводной ручной пульт с блокировкой (ключом)
- Панели управления на боковых ограждениях (с наружной стороны с функциями положения Тренделенбург и анти-Тренделенбург)
- Панели управления на боковых ограждениях с внутренней стороны с функцией ночной подсветки пола и вызова медицинского персонала
- Ножная педаль (опция)



Боковые ограждения

оснащены механизмом для их опускания



Положение Антитренделенбург

Эксплуатационные параметры:

- Механизмы кровати позволяют изменять высоту ложа, угол наклона спинной секции и секции голени, наклон Тренделенбург и Антитренделенбург, а также перемещать кровать.
- Возможность изменения угла положения спинной секции с помощью рычага для CPR.
- Изменение высоты ложа, продольные наклоны (Тренделенбург и Антитренделенбург), изменение угла наклона спинной секции и опоры для ног (секции бедра) осуществляется при помощи электроприводов.



Положение Тренделенбург

Органы управления



Центральная панель управления (supervisor)



Центральная панель управления и проводной пульт управления




Панели управления в боковых ограждениях

Головной и ножной торцы



Торцы пластиковые цвета RAL 9002 с вставками

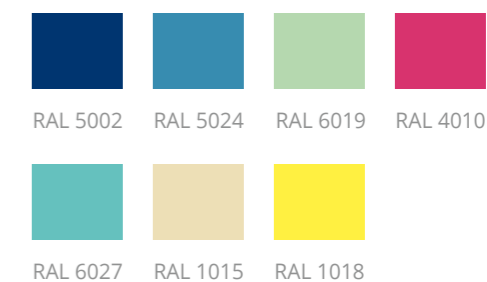

Палитра цветов вставок в торцах и боковых ограждениях

Famed Żywiec Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 1
34-300 Żywiec, Poland

Head Office:

tel.: +48 33 866 62 00
fax: +48 33 475 58 90

Export Department:

tel.: +48 33 866 62 58
tel.: +48 33 866 62 65
tel.: +48 33 866 62 66
fax: +48 33 861 46 78

export@famed.com.pl
www.famed.com.pl



Изделия соответствуют требованиям Европейской директивы MDD 93/42/ЕЕС в отношении медицинских изделий и Закона о медицинских изделиях.

Издание: 08/2015/02. Сохраняется возможность введения модификаций в связи с техническим прогрессом.

